



骨科								
缝合层次	倒刺	USP	针弧度	针型	针长(mm)	单双针	倒刺长度(cm)	型号
骨膜/肌肉筋膜-上肢脊柱筋膜肌肉	双向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BY024/ST361
	单向倒刺线	1	1/2弧	圆针	40	单针	45	BYI45/T401Q
肌肉筋膜-下肢	双向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYI24/ST361
	单向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	双针	20*20	BY320/ST221
膝关节囊/腱鞘/肌肉	双向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	单针	60	BYI60/T361Q
	单向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BY024/ST361
	双向倒刺线	2	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYII24/ST361

普外科								
缝合层次	倒刺	USP	针弧度	针型	针长(mm)	单双针	倒刺长度(cm)	型号
补片固定	双向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BY024/ST361
胆肠缝合	单向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	单针	24	BY324/T221Q
腹部筋膜缝合	单向倒刺线	1	1/2弧	圆针	40	单针	45	BYI45/T401Q
	双向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYI24/ST361
疝囊/腹膜	双向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BY024/ST361
胰肠吻合/结肠吻合/胰肠	单向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	26	单针	30	BY230/T261Q
造口缝合	单向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	单针	24	BY324/T221Q
甲状腺残端/颈白线	单向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	26	单针	30	BY230/T261Q
	双向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	26	双针	16*16	BY216/ST261
颈阔肌/皮下组织	双向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	双针	20*20	BY320/ST221

泌尿科								
缝合层次	倒刺	USP	针弧度	针型	针长(mm)	单双针	倒刺长度(cm)	型号
肾实质缝合	单向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	单针	30	BY030/T361Q
肾盂/肾盏	单向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	单针	24	BY324/T221Q
膀胱缝合	单向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	26	单针	30	BY230/T261Q
	双向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	26	双针	16*16	BY216/ST261
膀胱尿道吻合	单向倒刺线	2-0	5/8弧	圆针	27	单针	15	BY215/T275Q
	双向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	26	双针	16*16	BY216/ST261

*更多产品应用方案，请咨询邦尼医疗学术经理

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话：0519-8818 8331

网址：www.bnylkj.com

邮箱：bnylkj2018@163.com

邦尼外科医生好助手

帮你外科医生好助手



邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

可吸收性外科缝线

（国械注准20253020136）

免打结、带倒刺

自主研发生产，进口原材料


实现无结伤口闭合

方便、快捷、省时




相比传统缝线缝合，邦尼免打结倒刺缝线，节省50%以上的手术缝合时间

传统间断缝合

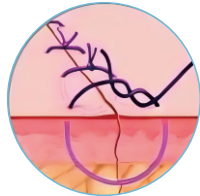


张力分布不均，打结费时

传统连续缝合

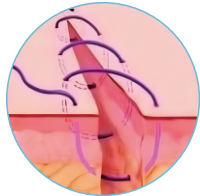


线结一旦滑脱可能导致伤口裂开


两种传统缝合弊端的整体解决方案

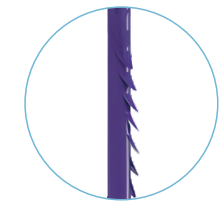

切割的倒刺螺旋状环绕分布在缝线核心周围

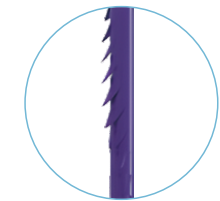

每厘米8-16个单向倒刺360度螺旋状均匀分布

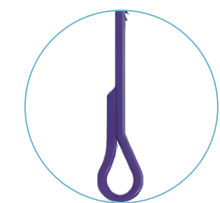

自锚固环，便于首针固定

名称：

可吸收性外科缝线

结构：

单股

材质：

缝线材料为聚对二氧环己酮(PDO)，缝针材料为不锈钢，均为进口原材料

颜色：

紫色

规格：


USP4-0到USP2

适用范围：


适合使用可吸收缝线的软组织缝合

张力强度：


有效张力维持56天，二周80%，六周50%-70%

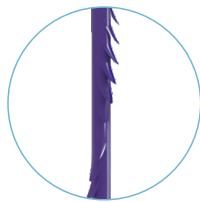

每厘米8-16个倒刺360度螺旋状均匀分布，顺上段出针端方向

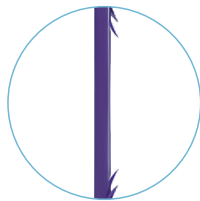


双向倒刺，正中分界点约1cm无倒刺段缝线两端呈反方向倒刺向两端延伸

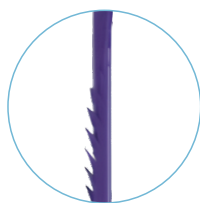

每厘米8-16个倒刺360度螺旋状均匀分布，顺下段出针端方向

单针缝线

双针缝线

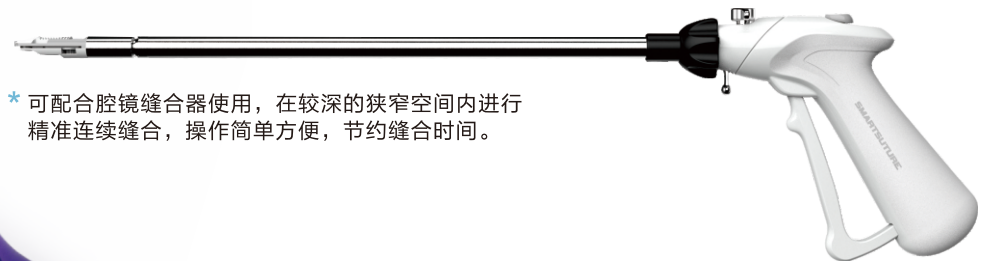

* 可配合腔镜缝合器使用，在较深的狭窄空间内进行精准连续缝合，操作简单方便，节约缝合时间。

产品特点：

免打结设计

倒刺线的设计使得缝合过程中无需打结，简化了手术步骤，减少了手术时间，降低了手术难度。

组织损伤小

倒刺线的使用可以减少对组织的损伤，由于其设计可以均匀地分布张力，从而减少了组织损伤和炎症反应。

高效的缝合

倒刺线的自锁功能使得缝合更加快速和牢固，尤其适合腹腔镜手术，减少了操作钳的使用数量和频次，提高了手术效率。

生物相容性

使用聚对二氧环己酮(PDO)制成的倒刺线，具有良好的生物相容性，能在植入180-220天后被完全降解吸收，减少了患者的异物感。

可吸收性外科缝线临床应用：

妇产科

缝合层次	倒刺	USP	针弧度	针型	针长(mm)	单双针	倒刺长度(cm)	型号
腹部筋膜缝合	单向倒刺线	1	1/2弧	圆针	40	单针	45	BYI45/T401Q
经腹部子宫切除: 子宫韧带/宫旁组织缝扎 /阴道残端/腹膜/腹壁	单向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	单针	60	BYI60/T361Q
	双向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYI24/ST361
卵巢囊肿/修补卵巢/输卵管	双向倒刺线	2	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYII24/ST361
	双向倒刺线	2-0	1/2弧	圆针	22	双针	14*14	BY214/ST221
剖宫产:子宫\腹膜\筋膜	单向倒刺线	1	1/2弧	圆针	40	单针	45	BYI45/T401Q
	双向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYI24/ST361
	双向倒刺线	2	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYII24/ST361

胸外科

缝合层次	倒刺	USP	针弧度	针型	针长(mm)	单双针	倒刺长度(cm)	型号
关胸: 筋膜缝合	单向倒刺线	1	1/2弧	圆针	40	单针	45	BYI45/T401Q
	双向倒刺线	1	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYI24/ST361
	双向倒刺线	2	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BYII24/ST361

神经外科

缝合层次	倒刺	USP	针弧度	针型	针长(mm)	单双针	倒刺长度(cm)	型号
硬脑膜/硬脊膜	单向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	单针	24	BY324/T221Q
	双向倒刺线	3-0	1/2弧	圆针	22	双针	20*20	BY320/ST221
帽状腱膜	单向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	单针	30	BY030/T361Q
	双向倒刺线	0	1/2弧	圆针	36	双针	24*24	BY024/ST361